

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de nettoyage pour analyseur de cellules sanguines-ABX

Ce produit est une solution de nettoyage destinée au système de réaction lors des tests effectués avec l'analyseur de cellules sanguines, afin de faciliter le test in vitro des cellules sanguines, de l'hémoglobine et d'autres substances à mesurer



Photo du Produit

Modèle du Produit	Analyseur de cellules sanguines ABX
Spécifications d'Emballage	500 mL, 1 L, 20 L
Code Produit	p1300

Usage Prévu

Ce produit est une solution de nettoyage destinée au système de réaction lors des tests effectués avec l'analyseur de cellules sanguines, afin de faciliter le test in vitro des cellules sanguines, de l'hémoglobine et d'autres substances à mesurer

Principe

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction. Son principe d'action principal est que les tensioactifs de la solution de nettoyage peuvent réduire efficacement la tension superficielle des protéines du système réactionnel...

