

Réactif de Diagnostic In Vitro

Réactif Hémolysant-86H

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser; si nécessaire, les leucocytes sont colorés avant la classification et la numération des cellules, ou la classification et la numération des cellules et/ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine sont réalisés directement



Photo du Produit

Modèle du
Produit

Réactif Hémolysant-86H

Spécifications
d'Emballage

500 mL, 5 L, 10 L, 20 L

Code Produit

p1139

Usage Prévu

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser; si nécessaire, les leucocytes sont colorés avant la classification et la numération des cellules, ou la classification et la numération des cellules et/ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine sont réalisés directement

Principe

Il lyse les globules rouges en maintenant intacte la morphologie des leucocytes, afin que l'analyseur effectue la numération et la classification des leucocytes par la méthode de diffusion de la lumière laser...

