

Réactif de Diagnostic In Vitro

Diluant-DR6

Il est utilisé pour diluer l'échantillon et préparer une suspension de cellules avant l'analyse des cellules sanguines



Photo du Produit

Modèle du Produit	Diluant-DR68
Spécifications d'Emballage	1 L, 1 L x 4, 4 L
Code Produit	p1305

Usage Prévu

Il est utilisé pour diluer l'échantillon et préparer une suspension de cellules avant l'analyse des cellules sanguines

Principe

Au cours de l'analyse des cellules sanguines, le Diluant-DR68 soumet les globules rouges à un traitement de sphéculation, permettant au composant colorant de la Solution de Coloration-FR68 de colorer rapidement les réticulocytes, en association avec la technique de cytométrie en flux fondée sur la diffusion de la lumière laser et la coloration fluorescente...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.